


## Alarmi mahavõtmine (nt kõrge alarm)


Alumist noolt vajutades pead kerima teksti lõppu, kuni ilmub kõige alla OK.

Sinna peale liikudes saad vajutada keskmist nuppu.

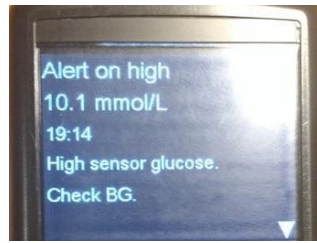

## Kalibreerimine


Kui pump ise küsib kalibreerimist, siis tuleb ette selline alarm, mille saab enda valitud ajaks vaigistada (Snooze), aega saab nooltega (üles-alla) muuta.

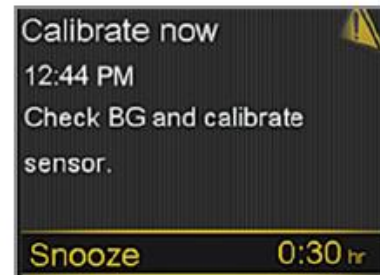

Kui kalibreerimine tegemata, siis veresuhkru numbrit ei näita, graafikul on selle asemel kiri Calibration required




Kalibreerimiseks liigu ekraanil noolega ekraani keskmisele osale (selle ääred muutuvad kollaseks siis).

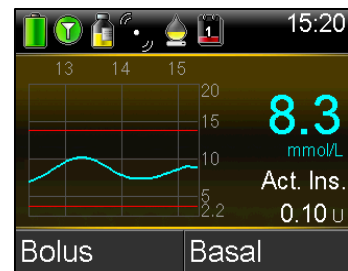


Hoia peal ümmargust keskmist nuppu, kuni ekraanile ilmub

kiri Calibrate Sensor.

Et veresuhkru numbrit (BG) sisestada, peab BG rea peal olles vajutama jälle keskmist ümmargust nuppu, siis hakkavad --- vilkuma ja sinna saab ülemist/alumist noolt kasutades õige numbri kerida.

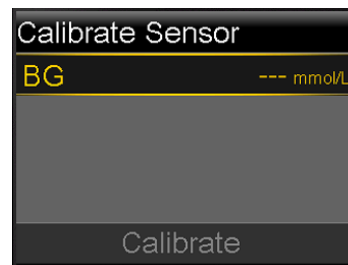

Kui number sisestatud, tuleb jälle keskmist ümmargust nuppu vajutada, see kinnitab ära sisestatud numbri ja muudab aktiivseks alumise rea. Nüüd tuleb sõnal Calibrate vajutada keskmist ümmargust nuppu. Sellega on sensor kalibreeritud.

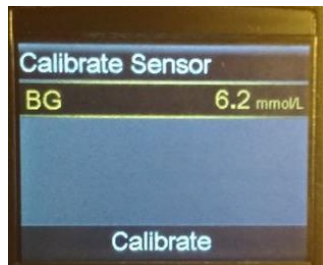

Kui midagi läheb kuskil valesti, siis tagasi saab sellest nupust.



### Insuliini annustamine kõrge veresuhkru korrigeerimiseks (Bolus)

- 1) Vali **Bolus**. "Vali" tähendab keskmise ümmarguse nupu vajutamist.
- 2) Vali **Bolus Wizard**.
- 3) Vali **BG** (veresuhkur)
- 4) Vajuta nooleklahve et kerida ette vajalik veresuhkrunumber (**BG**) ja vajuta keskmist nuppu.
- 5) Kui midagi ei söö, siis süsivesikuid (**Carbs**) ei pea sisestama. Vali **Next**.
- 6) Kui veresuhkur on üle 13,9, siis **High BG** hoiatus tuleb ekraanile. Vajuta noolega alla, et tekst lõpuni kerida ja alla äärde ilmuks **OK**.
- 7) Vali **OK**
- 8) Vali **Deliver Bolus**.



### Suspend before low – pump peatab insuliini annustamise, kui veresuhkur hakkab madalaks minema

Pump teeb seda ise sensori veresuhkru näidu alusel. Veresuhkru graafikul on sel ajal punast värvi taust ja ekraani alläres on kiri Suspended before low.

Öösel hoiab see väga hästi madalaid veresuhkruid ära, pump lülitab ise uuesti insuliini sisse, kui veresuhkur on tõusmas. Maksimaalselt peatab pump insuliini 2 tunniks. Kui 2 tunni möödudes on veresuhkur ikka liiga madal, siis annab pump alarmi.

Käsitsi saab ka Suspendi välja lülitada, tuleb vajutada keskmist nuppu, siis valida noolega Resume Basal ja vajutada selle peal keskmist nuppu, siis valida noolega Yes ja vajutada jälle keskmist nuppu. Seda peaks tegema ainult siis, kui Suspend on sisse lülitunud just enne sööki.

