

640g insuliinipumba kasutamine



Normaalolekus on pumbaekraan pime. Kui mõnda nuppu vajutada, siis ilmub ekraanil see info mis siin pildil. Punane ikoon ülemisel real tähendab, et midagi hakkab lõppema (patarei, insuliin, sensor).



Ajutine baasinsuliin

* pildil pumbaekraan sensori mittekasutamise korral



Sensori järgi on insuliini sisestamine peatatud läheneva madala või juba madala veresuhkru tõttu

Alarmid saab maha järgides ekraanil olevaid juhiseid

Kollane ekraanil näitab seda, mis on parasjagu valitud



Patarei tühjenemise jälgimine ekraanil. Kõige parempoolsemal juhul hakkab pump valjuhäälselt nõudma patarei vahetust. AA patarei



Kui insuliini indikaator on muutunud punaseks, saab insuliini üsnapea otsa.

Kui pumba ekraanil ilutseb CHANGE SENSOR, siis tuleb lihtsalt mõõta glükomeetriga veresuhkru.


Alarm, mille puhul helistada vanematele: INSULIN FLOW BLOCKED

Insuliini annustamine kõrge veresuhkru korrigeerimiseks, söömiseks või mõlemaks korraga



Insuliini annustamiseks tuleb ekraanil valida **BOLUS** ja vajutada keskmist nuppu. Võib järgneda juhis ekraanil, kuidas klahvilukku eemaldada, vajutada ekraanil näidatud pildile vastavat nuppu (üles, alla, vasakule, paremale). Seejärel valida loetelust **MANUAL BOLUS** ja kinnitada valik.

* juures oleval pildil on mõõtühikud teises süsteemis, kui Eestis harilikult kasutuses olev mmol/l.

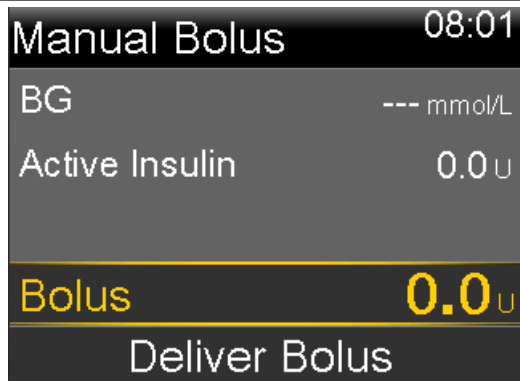

Vajutada veel kord kinnita nuppu, et **0.0u** hakkaks vilkuma. Sisestada üles/allu klahve kasutades soovitud insuliini kogus. Kinnitada valik. Kollaseks muutub **DELIVER BOLUS**, kinnitada. Ekraanil on näha, et insuliin hakkab sisestuma. Numbrid ekraanil liiguvad kuni soovitud insuliini koguse edastamise lõpuni.

